


Voisiko silmäproteesi tuntua paremmalta?



Silmäluomien hyvinvointivinkit proteesin käyttäjille

Tiedätkö mitä proteesin pintaan kertyy?

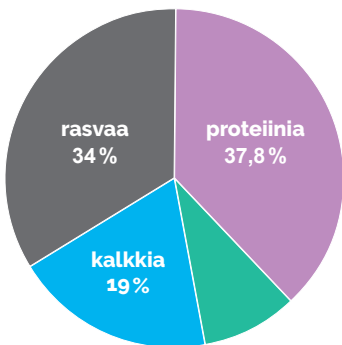

bakteereja 9,2%*

*) 68,2 % *Staphylococcus spp*
19 % *Staphylococcus spp* +
Pneumococcus spp
12,8 % *Gramm negative spp*
+ *Staphylococcus spp* +
Pneumococcus spp

Pesuohjeet ja vinkit

- Proteesin pesuun voi käyttää nestemäistä saippuaa.
- Älä käytä harjoja! Ne naarmuttavat proteesin pinta.
- Jos tulehdus vaivaa, ota yhteys lääkäriin. Proteesin pinta voi kotihoitona desinfioida (esim. Neo-Amisept).
- Proteesi huuhdellaan aina lopuksi juomakelpoisella vedellä.
- Proteesin kanssa voi käyttää keinokynneliä oman tarpeen mukaisesti.

Milloin on hyvä tulla kiillotuttamaan proteesi?

- Jos kotikonstit eivät auta ja proteesin pinta ei tunnu liukkaalta.
- Jos proteesiin on tullut naarmu tai särö.
- Jos luomien alla tuntuu karheutta.
- Jos proteesin pinta on muuttunut sameaksi.
- Jos kynnelnesteeseen erityisesti tai rähmintä on lisääntynyt huomattavasti.

Suosittellemme proteesin kiillotusta kerran vuodessa. Samalla tarkistetaan proteesin istuvuus sekä rauhallinen yleisilme.




SILMÄPROTEESIT
Lehto & Sohlberg


puh. (09) 621 1117

Proteesin asennus ja poisto

Asennus:

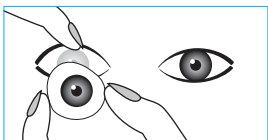


Nosta yläluomea ja vie proteesi yläluomen alle.

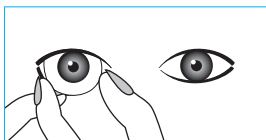


Työnnä proteesia ylöspäin ja vedä alaluomea alapäin, jolloin proteesi asettuu paikoilleen.

Poisto imututilla:

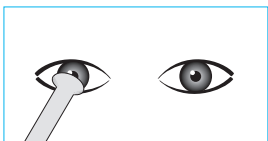


Kostuta imututin pää ja paina se proteesin pintaan.

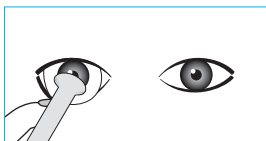


Vedä alaluomea alaspäin ja nosta proteesi alaluomen yli alaviistoon.

Poisto sormin:

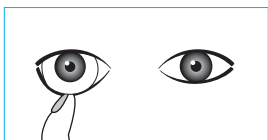

Vedä alaluomea alaspäin ja paina samalla sormella proteesin alareuna alaluomen yli.

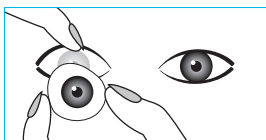

Nosta yläluomea ja tartu kahdella sormella proteesiin poistaaksesi sen.

Milloin proteesi on hyvä uusida tai korjata:

- Proteesin materiaali on vanhentunut ja sen pinnan karheus ylläpitää jatkuvaa tulehdusta.
- Silmäkuopan ja luomien alueen leikkausten jälkeen.
- Kasvojen luonnollisten muutoksien takia esim. lasten pituuskasvu.
- Proteesin väri ei ole ajan tasalla tai se on kellastunut.
- Proteesin katseen suunta ei ole luonteva.
- Silmäluomet aukeavat liikaa tai liian vähän.
- Silmäkuopan pohja/luomitaskut ovat muuttuneet.
- Proteesi pysyy huonosti paikallaan tai pääsee kääntymään väärään asentoon.

Anna meidän huolehtia proteesista puolestasi, jotta oma aikasi jää muuhun!

Terveisin,

Lea ja Liisa



SILMÄPROTEESIT
Lehto & Sohlberg

puh. (09) 621 1117