



SILMÄPROTEESIT

alusta loppuun asiakaskohtaisesti



SILMÄPROTEESIT

Lehto & Sohlberg Oy


ISODENT

Valmistamme, huollamme ja korjaamme yksilöllisiä muovisia silmäproteeseja

Valmistamme proteesit yksilöllisesti uusia moderneja tekniikoita sekä vanhoja hyväksi todettuja valmistusmenetelmiä käyttäen. Seuraamme tekniikoihin liittyviä uusia ratkaisuja ja päivitämme parhaat tekniikat käyttöömme.



**Yksilöllinen, kuten sinäkin –
pienintä yksityiskohtaa myöten.**

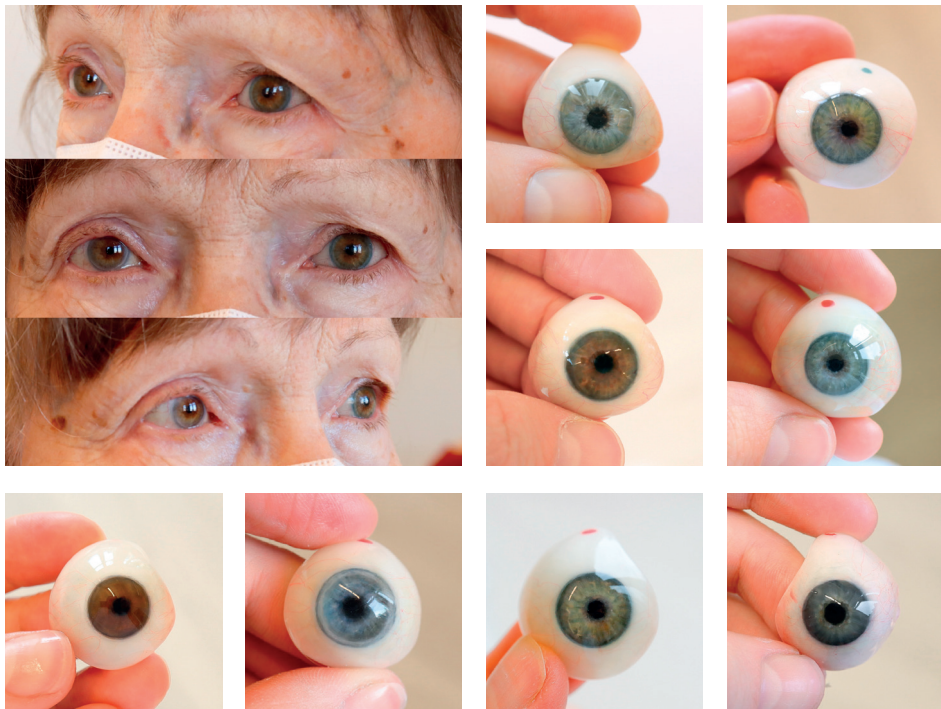

Ohjeita silmäproteesin käyttäjälle

Meillä valmistettu yksilöllinen silmäproteesi on vaivatonta huoltaa ja helppo käyttää. Proteesi muotoillaan ja värit lisätään terveen silmän kaltaiseksi, pienintä yksityiskohtaa myöten. Valmistamme yksilölliset silmäproteesimme akryylimuovista. Muovisen proteesin etuna on muokattavuus, kestävyys ja turvallisuus. Muovisia silmäproteeseja voivat käyttää kaikenikäiset, myös vauvat.

Proteesin ensimmäinen sovitus tehdään noin neljä viikkoa silmänpoiston jälkeen tai hoitavan lääkärin toivomana ajankohtana. Teemme myös kuori-proteeseja sokeutuneen silmän suojaksi. Silmäproteesin valmistus kestää kaikkine työvaiheineen noin 2 työpäivää. Yleensä asiakkaan on käytävä tänä aikana proteesipajalla 4–6 sovituskertaa. Tapauskohtaisesti proteesi voidaan valmistaa myös yhdessä päivässä.

Käyttö

Silmäproteesi on turvallinen ja helppo käyttää. Proteesi suojaa silmäkuoppaa kuivumiselta ja estää luomen reunaa silmäripsineen kääntymästä kuopan sisälle. Proteesi tukee myös silmäluomia.

Miten proteesia käytetään?

silmäproteesia voi pitää koko ajan silmäkuopassa, myös nukkuessa. Tällöin se poistetaan vain puhdistuksen ajaksi suihkussa ja saunassa voi käydä normaalisti uidessa, etenkin sukeltaessa, tulee käyttää uimalaseja voimakasta hieromista tulee välttää, etenkin ulospäin, sillä tällainen liike voi kääntää proteesin väärään asentoon alaluomen liiallinen venyttäminen voi aiheuttaa proteesin työntymisen ulos silmäkuopasta

Puhdistus

Alussa silmäproteesi on hyvä puhdistaa kerran päivässä. Tällöin tottuu myös sen laittamiseen ja pois ottamiseen. Myöhemmin proteesia pestään vain tarpeen mukaan.

Miten proteesia puhdistetaan?

- pestään vedellä ja nestemmisellä saippualla
- älä käytä harjoja, sillä ne naarmuttavat proteesin pintaa
- proteesin pintaa voi kotihoitona desinfioida (esim. Neo-Amisept)
- proteesi huuhdellaan aina lopuksi juomakelpoisella vedellä
- proteesin kanssa on hyvä käyttää keinokynneltippoja, etenkin jos silmäkuoppa kuivuu herkästi

“

Suosittelemme ottamaan pikimmiten yhteyttä hoitavaan lääkäriin, jos silmäkuopassa ilmenee tulehdusta, rähimistä tai muuta poikkeuksellista.

Kiillotus

Silmäproteesi puhdistetaan ja kiillotetaan koneellisesti pajallamme, asiakkaan odottaessa. Käynti kestää noin 30 minuuttia. Proteesin voi myös lähettää postitse kiillotettavaksi.

Milloin on hyvä tulla kiillotuttamaan proteesi?

- proteesin pinta ei tunnu liukkaalta
- proteesiin on tullut naarmu tai särö
- luomien alla tuntuu karheutta
- proteesin pinta on muuttunut sameaksi
- kyynelnesteen erityys tai räghmintä on lisääntynyt huomattavasti

Korjaus


Silmäkuoppa ja värit voivat muuttua ja proteesi tarvita päivitystä. Tällöin sen kokoa ja värejä voidaan korjata.

Milloin on hyvä tulla korjauttamaan proteesi?


- proteesin valmistuksesta on alle viisi vuotta
- proteesin katseensuunta ei ole luonteva
- silmäluomet aukeavat liikaa tai liian vähän
- silmäkuopan pohja/luomitaskut ovat muuttuneet
- kasvojen luonnollisten muutoksien vuoksi esim. lapsen kasvu, elintapamuutokset
- silmäkuopan ja luomien alueen leikkausten jälkeen
- proteesi pysyy huonosti paikallaan tai pääsee kääntymään väärään asentoon

“

Suosittellemme varaamaan proteesin kiillotusajan kerran vuodessa. Samalla tarkistetaan proteesin istuvuus sekä rauhallinen yleisilme.

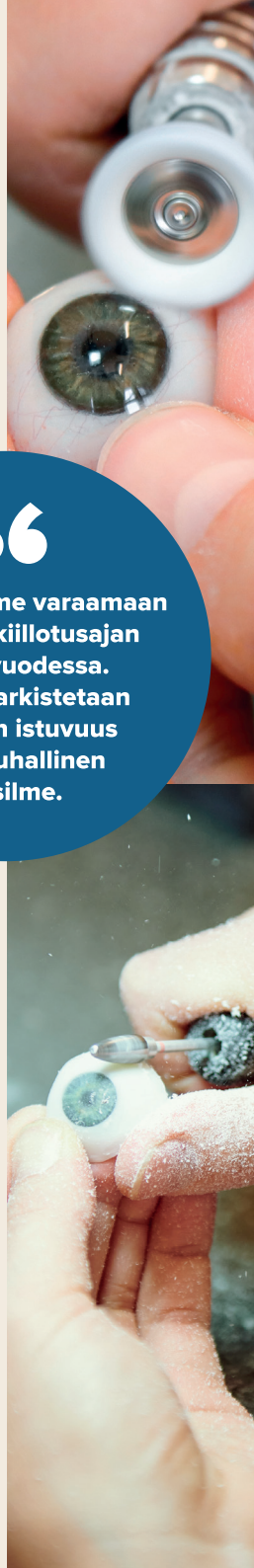

Käyttöikä ja uusiminen

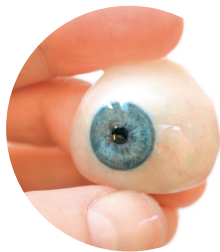

Suosittellemme uuden silmäproteesin tekoa viiden vuoden välein. Tässä ajassa silmäkuoppa ja jopa oma silmän väri voivat muuttua sen verran, että proteesin uusiminen on tarpeen. Vaikka proteesiin käytettävä muovi on kestävä materiaali, se ei ole ikuinen. Muovi heikkenee ja kellastuu ajan myötä, jolloin sen korjausta ei ole enää suositeltavaa tehdä.


Milloin on hyvä uusia proteesi?

- edellisen proteesin valmistuksesta on viisi vuotta
- proteesin materiaali on vanhentunut eikä kiillotus enää auta, jolloin sen pinnan karheus ylläpitää jatkuvaa tulehdusta
- kehon muutos, esim. painon muutokset tai raskaus
- proteesin materiaali on kellastunut eikä värit vastaa enää oman silmän värejä
- silmäkuopan ja luomien alueen leikkausten jälkeen
- proteesi pysyy huonosti paikallaan tai pääsee kääntymään väärään asentoon



Jos asiakas ei pysty tulemaan vastaanotolle, uusi silmäproteesi voidaan valmistaa vanhan proteesin mukaan. Tällöin uudessa proteesissa toistuvat kuitenkin entisen proteesin mahdolliset virheet.

Tiedätkö mitä proteesin pintaan kertyy?

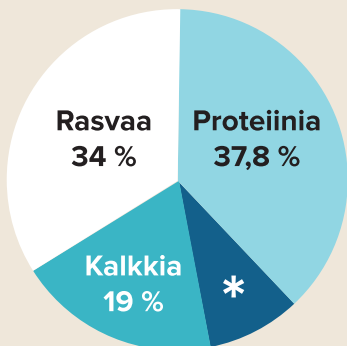

* Bakteereja 9,2 %

68,2 % Staphylococcus spp

19 % Staphylococcus spp +
Pneumococcus spp

12,8 % Gramm negative spp +
Staphylococcus spp +
Pneumococcus spp

Proteesin asennus ja poisto

Asennus:




Nosta yläluomea ja vie proteesi yläluomen alle.




Työnnä proteesia ylöspäin ja vedä alaluomea alaspäin, jolloin proteesi asettuu paikoilleen.

Poisto imututilla:

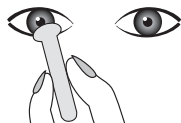

Kostuta imututin pää ja paina se proteesin pintaan.

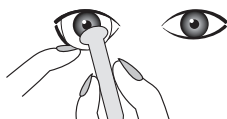


Vedä alaluomea alaspäin ja nosta proteesi alaluomen yli alaviistoon.

Poisto sormin:



Vedä alaluomea alaspäin ja paina samalla sormella proteesin alareuna alaluomen yli.

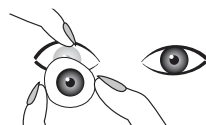

Nosta yläluomea ja tartu kahdella sormella proteesiin poistaaksesi sen.

Kustannukset ja korvaukset

Useimmiten terveydenhuolto korvaa silmäproteesin hankkimiskustannukset osana lääkinällistä kuntoutusta. Hoitava lääkäri tekee kuntoutusaloitteen. Hoitovastuusta riippuen maksusitoumuksen hyväksymisestä päätetään joko terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Valtion tapaturmavirasto maksaa sota- ja asevelvollisuusaikana sattuneiden tapaturmien kulut. Vakuutusyhtiöt korvaavat kustannukset useissa työ- tai liikennetapaturmissa ja vastaavissa korvausvelvoitteen piiriin kuuluvissa tapauksissa.



Suosittellemme ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai hyvinvointialueenne kuntoutussuunnittelijaan hakiessanne maksusitoumusta uuden proteesin tekoon, korjaukseen tai kiillotukseen.



SILMÄPROTEESIT

Lehto & Sohlberg Oy

ISODENT



Janiika Määttä

Puh: 050 375 0340

silmaproteesit@isodent.fi



Enni Kettunen

Puh: 050 372 0340

silmaproteesit@isodent.fi



Jack Zolty

Ajanvaraukset numeroista

050 375 0340 tai

050 372 0340

silmaproteesit@isodent.fi



Jyrki Isojärvi

Puh: 040 738 8916

jyrki.isojarvi@isodent.fi

Tervetuloa!

Proteesipajamme sijaitsee aivan Helsingin keskustassa lähellä rautatie- ja linja-autoasemia sekä Finnairin bussipysäkkiä. Proteesipajamme lähistöllä sijaitsee useita hotelleja ja suosittelemme sinulle mielellämme majoitusta.

Annamme mielellämme lisätietoja, soita ja kysy!

www.silmaproteesit.fi

Yhteystiedot

Mikonkatu 19 B 4. krs, 00100 Helsinki

Aukioloaika: ma-pe klo 08.00-16.00

Puhelin: (09) 621 1117



Pääsisääkäynti: Mikonkatu 19 B, 4. krs

Sisääkäynti liikuntaesteisille: Vilhonkatu 6