



ÖGONPROTESER

från början till slut för varje enskild kund



SILMÄPROTEESIT

Lehto & Sohlberg Oy


ISODENT

Vi tillverkar, underhåller och reparerar enskilda ögonproteser av plast

Vi tillverkar proteser individuellt med hjälp av ny modern teknik och gamla beprövade tillverkningsmetoder. Vi håller koll på nya tekniska lösningar och uppdaterar den bästa tekniken för vår användning.



**Individuell, precis som
du – in i minsta detalj.**

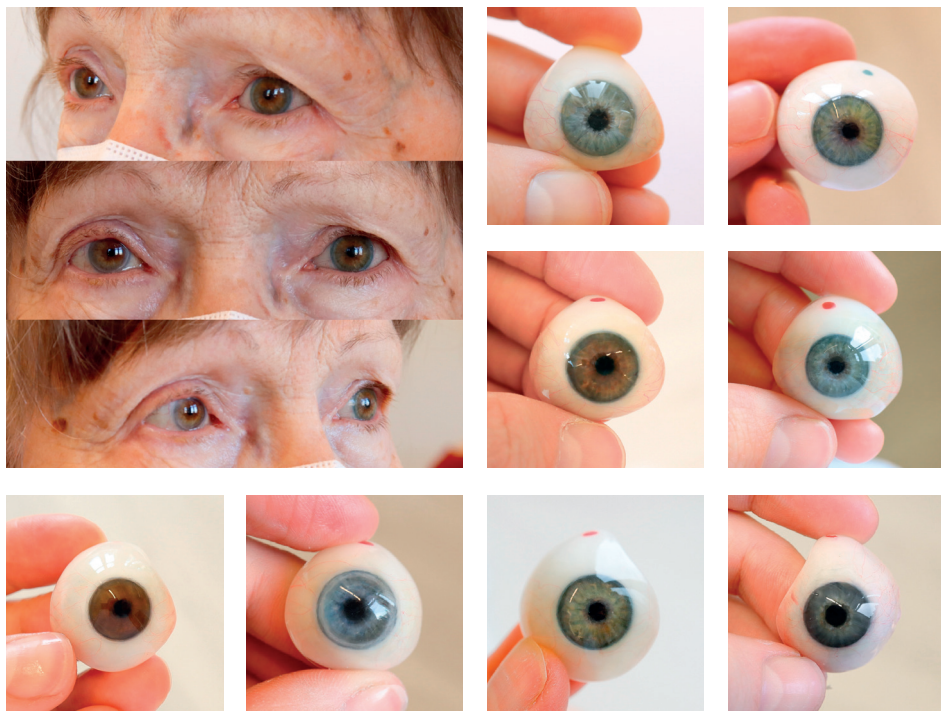

Instruktioner för användaren av ögonprotes

En individuell ögonprotes som tillverkas av oss är lätt att underhålla och lätt att använda. Protesen formas och färger tillsätts för att likna det friska ögat, in i minsta detalj. Vi tillverkar våra individuella ögonproteser av akrylplast. Fördelen med en plastprotes är anpassningsförmåga, hållbarhet och säkerhet. Ögonproteser i plast kan användas av människor i alla åldrar, inklusive spädbarn.

Den första monteringen av protesen görs cirka fyra veckor efter ögonborttagningen eller vid en tidpunkt som den behandlande läkaren önskar. Vi tillverkar även skalproteser för att skydda det blinda ögat. Tillverkningen av en ögonprotes inklusive alla arbetsmoment tar ca. 2 arbetsdagar. Vanligtvis måste kunden gå till protetikverkstaden för 4–6 provningar för passformen under denna tid. I vissa fall kan protesen också färdigställas på en dag.

Användning

Ögonprotesen är säker och enkel att använda. Protesen skyddar ögonhålan från att torka ut och förhindrar ögonfransarnas på ögonlockets kant från att svängas inåt. Protesen stöder även ögonlocken.

Hur används protesen?

- ögonprotesen kan hållas i ögonhålan hela tiden, även när man sover. I detta fall tas den endast bort för rengöring
- man kan duscha och bada bastu som vanligt
- simglasögon bör användas vid simning, speciellt vid dykning
- kraftig gnidning bör undvikas, särskilt utåt, eftersom detta kan leda till att protesen hamnar i fel läge
- överdriven töjning av det nedre ögonlocket kan leda till att protesen sticker ut från ögonhålan

Rengöring

I början är det bra att rengöra ögonprotesen en gång om dagen. Då vänjer man sig också vid att sätta på och ta av den. Senare tvättas protesen endast vid behov.

Hur rengörs protesen?

- den tvättas med vatten och flytande tvål
- använd inte borstar, eftersom de repar protesens yta
- protesens yta kan som hembehandling desinficeras (t.ex. Neo-Amisept)
- protesen sköljs alltid till slut med dricksvatten
- det är bra att använda konstgjorda tårddroppar med protesen, speciellt om ögonhålan lätt torkar ut

“

Vi rekommenderar att du kontaktar den behandlande läkaren så snart som möjligt om inflammation, gruskänsla eller andra ovanliga symtom uppstår i ögonhålan.

Polering

Ögonprotesen rengörs och poleras mekaniskt i vår verkstad, medan kunden väntar. Besöket tar cirka 30 minuter. Protesen kan även skickas med post för att poleras.

När är en bra tidpunkt att komma för att polera din protes?

- protesens yta känns inte hal
- protesen är repad eller sprucken
- strävhet känns under locken
- protesens yta har blivit grumlig
- tårsekretion eller tårbildning har ökat avsevärt

“

Vi rekommenderar att du bokar en tid för polering av protesen en gång om året. Samtidigt kontrolleras protesens passform och att det allmänna utseendet är lugnt.

Korrigerig


Ögonhålan och färgerna kan ändras och protesen kan behöva uppdateras. I det fall kan dess storlek och färger korrigeras.

När är en bra tidpunkt att komma för att korrigera en protes?

- när det är mindre än fem år sedan protesen tillverkades
- protesens blickriktning är inte naturlig
- ögonlocken öppnar sig för mycket eller för lite
- botten på ögonhålan/ögonlocksflikarna har ändrats
- på grund av naturliga ansiktsförändringar, t.ex. då barnet växer, livsstilsförändringar
- efter operationer av ögonhålan och ögonlocksområdet
- protesen sitter inte på plats eller kan vända till fel position



Livslängd och förnyelse

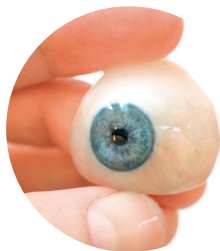

Vi rekommenderar att man gör en ny ögonprotes vart femte år. Under denna tid kan ögonhålan och till och med ögats egen färg ändras i den mån att byte av protesen är nödvändig. Även om plasten som används för protesen är ett hållbart material, varar den inte för evigt. Plasten försvagas och gulnar med tiden, då rekommenderas att inte längre reparera den.


När är det bra att förnya protesen?

- när det är fem år sedan protesen tillverkades
- protesens material är föråldrat och polering hjälper inte längre, och ytans ojämnheter bibehåller en konstant inflammation
- kroppsförändringar, till exempel viktförändringar eller graviditet
- protesens material har gulnat och färgerna matchar inte längre färgerna i ditt eget öga
- efter operationer av ögonhålan och ögonlocksområdet
- protesen sitter inte på plats eller kan vända till fel position



Om kunden inte kan komma till mottagningen, kan en ny ögonprotes tillverkas enligt den gamla protesen. I det fall kommer dock de eventuella felen från den tidigare protesen att upprepas i den nya protesen.

Vet du vad som samlas på protesens yta?

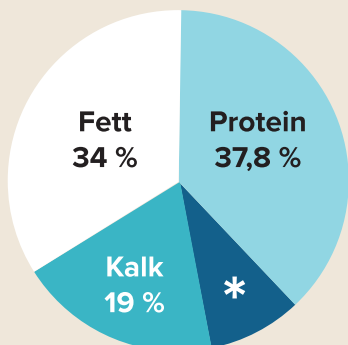

* Baciller 9,2 %

68,2 % Staphylococcus spp

19 % Staphylococcus spp +
Pneumococcus spp

12,8 % Gramm negative spp +
Staphylococcus spp +
Pneumococcus spp

Montering och borttagning av protesen

Montering:



Lyft det övre ögonlocket och för protesens under det övre ögonlocket.




Skjut protesens uppåt och dra ned det nedre ögonlocket, så sätter sig protesens på plats.

Borttagning med sugkopp:



Fukta sugkoppens ända och tryck den mot protesens yta.

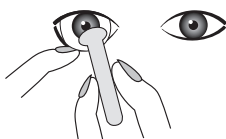


Dra ned det nedre ögonlocket och lyft protesens över det nedre ögonlocket snett nedåt.

Borttagning med fingrarna:



Dra det nedre ögonlocket nedåt och samtidigt tryck protesens nedre kant över det nedre ögonlocket med fingret.

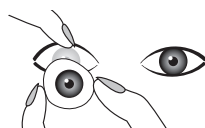

Lyft det övre locket och ta tag i protesens med två fingrar för att ta bort den.

Kostnader och ersättning

I de flesta fall ersätter sjukvården kostnaden för att skaffa en ögonprotes som en del av medicinsk rehabilitering. Det är den behandlande läkaren som gör remissen om rehabilitering. Beroende på vem som ansvarar för vården fattas beslutet om godkännandet av betalningsförbindelsen antingen på vårdcentralen eller på sjukhuset.

Statens haverikommission betalar kostnaderna för olyckor som inträffat under krigstid och militärtjänstgöring. Försäkringsbolagen ersätter kostnaderna vid flera arbets- eller trafikolyckor och liknande fall som omfattas av ersättningsskyldigheten.



Vi rekommenderar att man kontaktar sin behandlande läkare eller rehabiliteringsplanerare inom eget välfärdsområde när man ansöker om en betalningsförbindelse för en ny protes, reparation eller polering.



SILMÄPROTEESIT

Lehto & Sohlberg Oy

ISODENT



Janiika Määttä

Tfn: 050 375 0340

silmaproteesit@isodent.fi



Enni Kettunen

Tfn: 050 372 0340

silmaproteesit@isodent.fi



Jack Zolty

Tidsbeställning från nummer

050 375 0340 eller

050 372 0340

silmaproteesit@isodent.fi



Jyrki Isojärvi

Tfn: 040 738 8916

jyrki.isojarvi@isodent.fi

Välkommen!

Vår protesverkstad ligger mitt i Helsingfors centrum, nära järnvägs- och busstationerna och Finnairs busshållplats. Det finns flera hotell i närheten av vår protesverkstad och vi rekommenderar gärna boende.

Vi ger gärna mer information, ring och fråga!

www.silmaproteesit.fi

Kontaktinformation

Mikaelsgatan 19 B 4. vån, 00100 Helsingfors

Öppettider: mån-fre kl. 08.00-16.00

Telefon: (09) 621 1117



Huvudingång: Mikaelsgatan 19 B, 4. vån.

Ingång för funktionshindrade: Vilhelmsgatan 6